


## הוראות שימוש למכשיר VAPOTHERM PF למבוגרים עד 40LPM

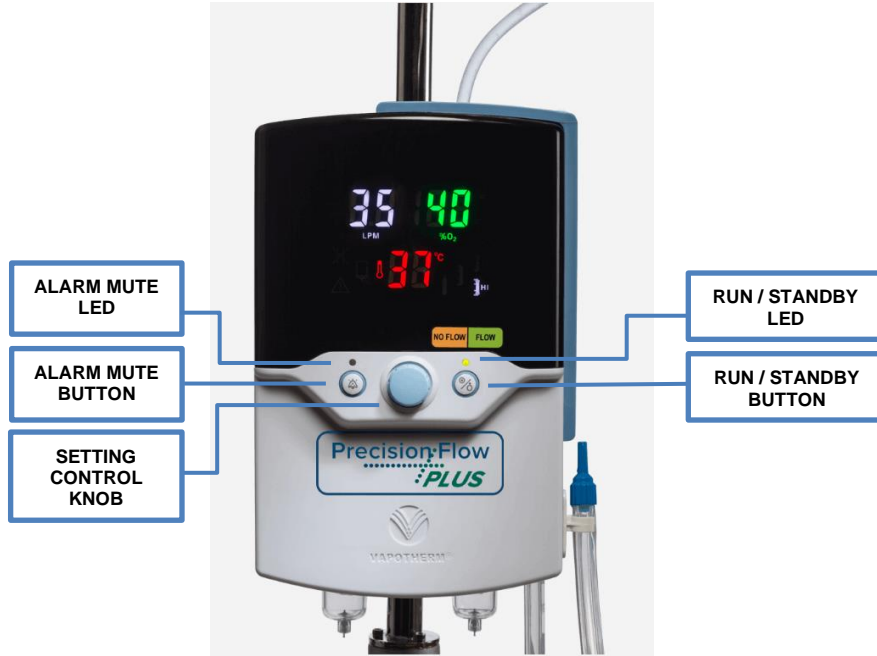

### הדלקת המכשיר

- א. חבר את המכשיר למקור חמצן + אוויר, לרשת חשמל.
- ב. הכן את הסט וחבר למכשיר
1. 
  2. 
  3. 
- ג. תלה מים סטריליים של 1L או 3L על עמוד המכשיר וחבר מים לדקרן היוצא מסט הדקרן הסגור.  
**אין להכניס את הסט למכשיר!**  
המתן דקה וחצי עד שתי דקות עם דקרן מים פתוחים.  
**רק לאחר מכן, הכנס את הסט.**
- ד. הדלק את המכשיר ע"י לחיצה על הכפתור הימני- %  
RUN/STANDBY BUTTON.  
הנורה מעליו תידלק בכתום.
- ה. כוון את הפרמטרים הנחוצים-  
- לחץ על הכפתור האמצעי-  וסובב לפרמטר הרצוי (טמפרטורה- **באדום**, ריכוזי חמצן- **בירוק**, FLOW- בלבן)  
- לחץ לחיצה נוספת על ה-  לאישור הפרמטר.  
- כוון לערך הרצוי באמצעות סיבוב ה-   
- לחץ לחיצה נוספת על ה-  לאישור הערך.  
- סיים את הפעולה ע"י לחיצה על ה-  RUN/STANDBY BUTTON.  
כעת תידלק במכשיר נורה ירוקה מהבהבת.
- ו. חיבור המטופל למכשיר- כאשר הנורה הירוקה **תדלק**  
**באופן קבוע**- חבר את המטופל.

**טמפ' עבודה - 36°C**

## כיבוי המכשיר

- א. לחץ על הכפתור הימני לחיצה אחת. המכשיר כעת במצב STANDBY, הנורה תהפוך מירוק לכתום ולאחר כדקה, המכשיר יכבה.
- ב. סגור את תפסן המים.
- ג. הוצא החמצן והאוויר מהקיר.
- ד. **אין לנתק את המכשיר ממקור החשמל! גם לאחר סיום השימוש.**

## ALARMS - התראות

יחידה חד פעמית לא תקינה - יש לבצע כיבוי, להוציא את הקיט, לנער קלות, להכניסו מחדש ולהפעיל את המכשיר. במידה ועדין מופיעה התראה זו, יש להחליף את הקיט.



ה.

נפילת מערכת כללית - יש לבצע כיבוי והפעלה מחדש.

במידה ולהתראה זו נוספים --, קיימת בעיה באחד הפרמטרים (FLOW / O2 / טמפ').



א.

סוללת הגיבוי נטענת - בעת הופעת האייקון בצד ימין כאשר המכשיר מחובר לרשת חשמל.



ו.

חסימת מערכת - לרוב יש לבצע סקשן מטופל.



ב.

סוללת הגיבוי מגבה עד 15 דקות - בזמן עבודת המכשיר על סוללת הגיבוי, אייקון סוללת הגיבוי יבהב.



ז.

חוסר מים - יש לוודא ששקית העירווי לא חסומה.



ג.

### לפי הנחיות היצרן:

- יש להחליף צנרת (סט קומפלט) בין חולה לחולה.
- זמן שימוש מקסימלי לחולה באותו סט - עד 30 יום.
- עם הוצאת המטופל, יש לנקות עם מטליות ספוגות אלכוהול (או כל חומר אחר המסופק ע"י ביה"ח).

### לשאלות ובירורים נוספים:

ליאת: 050-2003501

יבגני: 050-2003502

אריק: 050-2821834